

注射で泣く子を、
ゼロにしたい。

痛くない歯科治療へ

マイクロニードルが表面麻酔の概念を変える^{※1}

最速
1分^{※2}

迅速な
施術が可能

ぴたっと
固定


表麻薬が
流れない

しっかり
浸透^{※3}

痛くない
浸麻を実現

局所表面麻酔用 医療機器

アネスパッチ

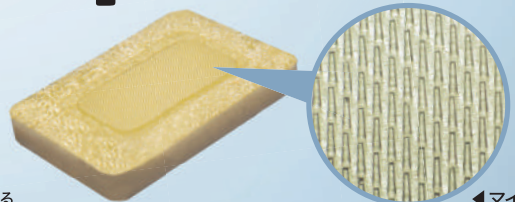

◀マイクロニードル




マイクロニードルで 表面麻酔がここまで進化^{※1}

最速1分^{※2}、貼って浸透^{※3}


アネスパッチとは...

アネスパッチはマイクロニードル技術を歯科表面麻酔に応用した医療機器です。長さ250~300 μ m、数百本の微細な針が歯肉の上皮部(薬物透過バリア)表面に圧迫、固定。微細針の力で薬剤を素早く吸収されることを可能としました。

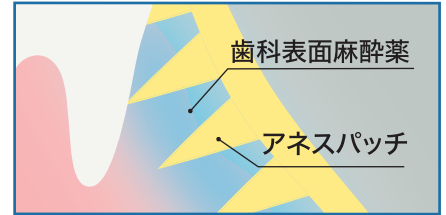

*イメージ図


使用方法

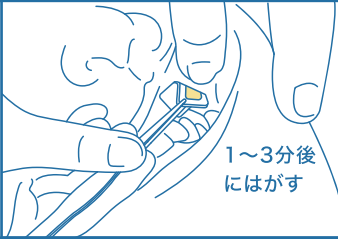

使い方動画は
こちら▶



アネスパッチ(SS)

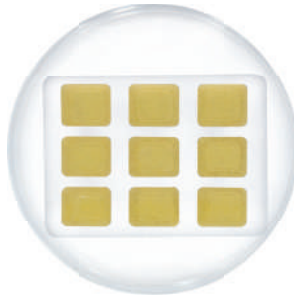

15.5mm×13mm
1セット/5シート 45枚入
¥3,740(税込)

アネスパッチ(S)



21mm×14mm
1セット/5シート 30枚入
¥3,740(税込)

アネスパッチ(L)



28mm×18mm
1セット/5シート 20枚入
¥3,740(税込)

推奨 ■歯科用表面麻酔薬は、「ネオザロカイン パスタ」、「ハリケイン ゲル」を推奨します。 ■浸麻の際、注射針は31~35Gを推奨します。

こんな時も

小児で浸麻が 必要な処置に




脱落寸前の乳歯なら
抜歯可能な症例も

スケーリング、 SRPの前処置に



浸麻までは必要ないが、
痛みがでないようにする
配慮のために

口内炎の処置に

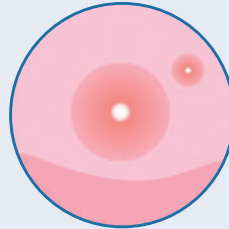

レーザーによる
口腔粘膜 処置の痛み
軽減のために

痛みに弱い 患者さんに



浸麻が苦手な
患者さんのストレス
激減のために

本製品監修 博士(歯学)日本歯科麻酔学会認定医 いまい歯科クリニック院長 今井 弘貴 先生

【発売元】ノイシュタットジャパン株式会社
東京都江戸川区南小岩7-13-1
お問合せ先 050-3647-4188

【製造販売元】コスメティ製薬株式会社
京都府京都市南区東九条河西町32
お客様相談室 075-748-8470

ご注文は
コチラ▶



ノイシュタットジャパン



FEEDデンタル



Ciモール

※1 従来の局所表面歯科麻酔処置方法と比較して ※2 貼付時間の目安として ※3 マイクロニードルの物理的作用による